

MICRO TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES MOLLE MNT COYOTE

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Micro Trauma Kit NOW!, oder Micro TKN, ist die kleinste Version des Trauma Kit NOW! für den Alltag. Es wurde entwickelt, um lebenswichtige medizinische Supplies am Gürtel zu tragen. Das Micro TKN wurde als Trauma-Kit für den täglichen Gebrauch für Polizeibeamte, vorbereitete Bürger oder Jäger entworfen. Die Bereitstellung von kritischen Erste-Hilfe-Supplies kann mit einer Hand oder einem einzelnen Finger von der linken oder rechten Seite durch Ziehen an den BLIP-Ziehschlaufen erfolgen. Das Micro TKN besteht aus zwei Hauptkomponenten – der äußeren MOLLE- oder Gürtelmontage-Tasche, die die Ten-Speed-Technologie nutzt, und einem abnehmbaren Einsatz, der die medizinischen Supplies organisiert. Das Essentials Kit enthält: Trauma-Handschuhe (1x Paar) Quickclot Blutstillungsverband (1x) Mini-Kompressionsverband (1x) Hypothermie-Decke - Orange/Silber (1x) Flachfaltenband (1x)



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES MOLLE MNT COYOTE](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100050368
- Herst.-Nr.: HW-TKN-MTKN-ESS
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 810073650015

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Micro Trauma Kit NOW! Essentials Supplies](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Micro Trauma Kit NOW! Essentials Supplies

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Micro Trauma Kit NOW! von BLUE FORCE GEAR. Dieses kompakte und tragbare ErsteHilfeSet ist speziell für den täglichen Gebrauch konzipiert. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Micro Trauma Kit NOW! nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Inhalt des Kits auf Haltbarkeit und Vollständigkeit.
- Lagere das Kit an einem trockenen und kühlen Ort, um die Qualität der medizinischen Supplies zu erhalten.
- Bei Unsicherheiten zur Anwendung kontaktiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die TraumaHandschuhe nur einmal und entsorge sie nach Gebrauch.
- Stelle sicher, dass alle Produkte im Kit vor der Anwendung unbeschädigt sind.
- Bei der Anwendung von Quickclot und anderen Blutstillungsverbänden folge den beiliegenden Anweisungen genau.
- Achte darauf, dass die HypothermieDecke nicht beschädigt wird, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten.
- Vermeide den Kontakt mit offenen Wunden, wenn du die Supplies anwendest, ohne geeignete Handschuhe zu tragen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Zugang zum Kit:

- Ziehe an den BLIPZiehschlaufen, um das Kit schnell zu öffnen.
- Stelle sicher, dass du das Kit mit einer Hand oder einem einzelnen Finger bedienen kannst.

2. Verwendung der Supplies:

- **TraumaHandschuhe:** Ziehe ein Paar Handschuhe an, bevor du mit der Behandlung beginnst.
- **Quickclot Blutstillungsverband:** Öffne die Verpackung und lege den Verband auf die Wunde. Drücke fest, um die Blutung zu stillen.
- **MiniKompressionsverband:** Wickle den Verband um die Wunde und sichere ihn mit der Klebefläche.
- **HypothermieDecke:** Entfalte die Decke und lege sie über die betroffene Person, um die Körperwärme zu speichern.
- **Flachfaltenband:** Verwende es zur Sicherung von Verbänden oder zur Fixierung von Ausrüstung.

3. Nach der Anwendung:

- Entsorge benutzte Materialien ordnungsgemäß.
- Reinige deine Hände gründlich nach der Anwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Einwegartikel, wie Handschuhe und Verbände, in einem geschlossenen Abfallbehälter.
- Achte darauf, dass die Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften für medizinische Abfälle erfolgt.
- Lagere das Kit an einem sicheren Ort, bis es vollständig wieder aufgefüllt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bei der Verwendung des Micro Trauma Kit NOW! wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Es ist wichtig, dass du immer Zugang zu Informationen hast, um die Sicherheit und Wirksamkeit deines Kits zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Halte dich über Änderungen und Rückrufinformationen auf dem Laufenden, indem du die Safety Gate-Plattform der EU besuchst.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at